


# POSITIONNEMENT DU PATIENT POUR LA PRISE DE RADIOGRAPHIE ET POINTS DE REPÈRES DE LA VALVE

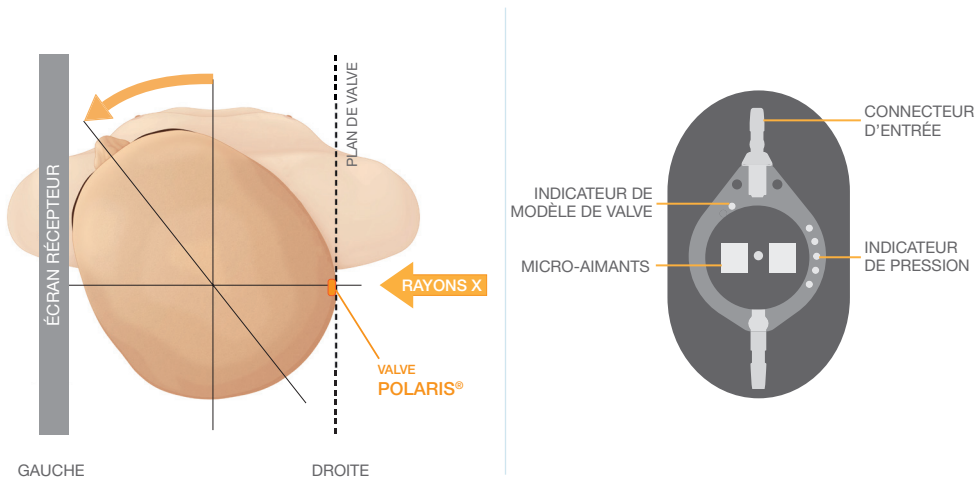

Polaris® est une marque enregistrée par Sophysa


©Sophysa 2020

DFSh-SPV-02(FR) Rev000 - 05/2020



# LECTURE DU RÉGLAGE DE LA VALVE

POLARIS®

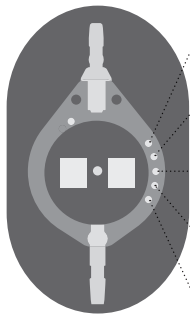

	SPV-140	SPV	SPV-300	SPV-400
P1	10 mm H <sub>2</sub> O	<b>30</b> mm H <sub>2</sub> O	50 mm H <sub>2</sub> O	80 mm H <sub>2</sub> O
P2	40 mm H <sub>2</sub> O	<b>70</b> mm H <sub>2</sub> O	100 mm H <sub>2</sub> O	150 mm H <sub>2</sub> O
P3	80 mm H <sub>2</sub> O	<b>110</b> mm H <sub>2</sub> O	150 mm H <sub>2</sub> O	230 mm H <sub>2</sub> O
P4	100 mm H <sub>2</sub> O	<b>150</b> mm H <sub>2</sub> O	220 mm H <sub>2</sub> O	330 mm H <sub>2</sub> O
P5	140 mm H <sub>2</sub> O	<b>200</b> mm H <sub>2</sub> O	300 mm H <sub>2</sub> O	400 mm H <sub>2</sub> O