

Mode d'emploi simplifié

# Système Pressio<sup>®</sup> 2

Monitoring de PIC / PIC + T°



---

# Sommaire

Installer et allumer l'appareil	3
Faire le zéro du capteur	4
Calibrage du moniteur patient	5
Options	6

 Veuillez vous référer à la notice d'utilisation - NT500

# Installer et allumer l'appareil

1

- 1 Fixer le moniteur Pressio® 2 sur une potence



- 2 Brancher le moniteur Pressio® 2 au secteur

- 3 Connecter le câble d'extension de cathéter à la prise blanche du moniteur Pressio® 2



- 4 Allumer le moniteur Pressio® 2 en appuyant sur bouton [ON]



- 5 Le moniteur Pressio® 2 réalise un autotest pendant 4 secondes

 **SOPHYSA**  
At the heart of the **brain**

SN : YYGNNNN  
Software V1.00

## Faire le zéro du capteur



Faire le zéro du capteur AVANT Implantation


Le moniteur Pressio® 2 affiche

Brancher cathéter

- 1 Préparer une cupule d'eau stérile sur un champ stérile

2

- 2 Connecter le cathéter Pressio® au câble d'extension de cathéter (jusqu'au trait bleu)

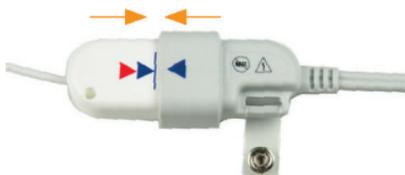

- 3 Immerger l'extrémité du capteur dans le liquide sans toucher la cupule



- 4 Appuyer sur la touche [Zéro]  écran

- 5 La mise à zéro du cathéter Pressio® prend quelques secondes

Zéro cathéter en cours

70%

Zéro cathéter OK  
Implanter cathéter

# Calibrage du moniteur patient

- 1 Connecter le moniteur Pressio<sup>®</sup> 2 au moniteur patient à l'aide des câbles **Pression** et **Température**



2 Envoi signal  
**0 mmHg**  
au moniteur patient

- 2.1 Appuyer sur la touche [Zéro] du moniteur patient
- 2.2 Le moniteur patient doit alors afficher 0 mmHg de façon stable
- 2.3 Appuyer sur [OK] sur l'écran moniteur Pressio<sup>®</sup> 2

3 Envoi signal  
**30 mmHg**  
au moniteur patient

- 3.1 Le moniteur patient doit alors afficher 30 mmHg de façon stable
- 3.2 Appuyer sur [OK] sur l'écran moniteur Pressio<sup>®</sup> 2

4 Envoi signal  
**60 mmHg**  
au moniteur patient

- 4.1 Le moniteur patient doit alors afficher 60 mmHg de façon stable
- 4.2 Appuyer sur [OK] sur l'écran moniteur Pressio<sup>®</sup> 2


3

# Options - Langues


- 1 Appuyer sur le bouton [Menu]



- 2 Accéder au menu langue en appuyant sur [Langue]

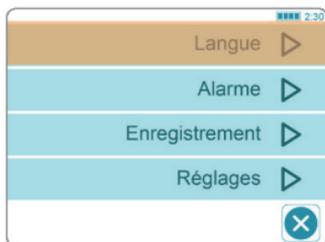

- 3 Sélectionner la langue en appuyant sur la langue souhaitée

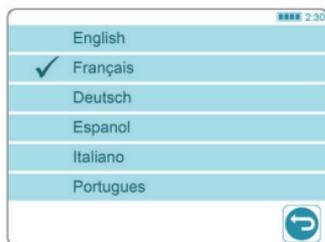

- 4 Valider votre choix en appuyant sur [Retour]



- 5 Revenir au monitoring en appuyant sur [Quitter]



# Options - Alarmes


## Activer / Désactiver

## Seuils

- 1 Appuyer sur le bouton [Menu]



- 2 Accéder au menu alarme en appuyant sur [Alarme]

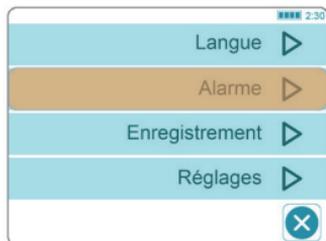

- 3 Appuyer sur [ON] pour activer l'alarme



- 3.1 Appuyer sur [OFF] pour désactiver l'alarme (Code 1234V)



- 3.2 Ajuster les seuils (max et mini) de déclenchement en appuyant sur [+] ou [-]



- 4 Valider votre choix en appuyant sur [Retour]



- 5 Revenir au monitoring en appuyant sur [Quitter]



# Nettoyage et Désinfection

## Instructions Générales

- 1 Nettoyer le moniteur Pressio® 2 ainsi que tous ses câbles, et désinfecter le câble d'extension de cathéter entre chaque patient.  
-----
- 2 Débrancher et éteindre le moniteur avant de le nettoyer. Ne jamais nettoyer et désinfecter le moniteur, ses câbles ou le cathéter pendant leur utilisation chez un patient.  
-----
- 3 Ne pas immerger, autoclaver ou plonger le moniteur ou ses accessoires dans un liquide.  
-----
- 4 Utiliser uniquement des lingettes pré-imprégnées d'alcool isopropylique à 70% (IPA).  
-----
- 5 Ne jamais nettoyer l'intérieur des connecteurs.

# Nettoyage et Désinfection

## Procédure détaillée

Moniteur et câbles

**NETTOYER**



**FROTTER TOUS LES CÔTÉS**

- 1 Débrancher et éteindre le moniteur puis déconnecter tous les câbles et périphériques USB.
- 2 Nettoyer le moniteur ainsi que tous les câbles.

Câble d'extension de cathéter

**DÉSINFECTER**



**TOUJOURS HUMIDE**

- 1 Le câble est déjà déconnecté du Moniteur Pressio® 2 et du cathéter.
- 2 Désinfecter le câble d'extension de cathéter.



**Ne pas rincer et laisser sécher 1 heure à l'air libre**



### Sophysa

5, rue Guy Moquet  
91400 Orsay - France  
Tel.: +33 (0)1 69 35 35 00  
Fax: +33 (0)1 69 35 36 90  
contact@sophysa.com

### Sophysa Benelux

Axis Parc - Rue Emile Francqui 6  
1435 Mont-Saint-Guibert - Belgium  
Tel : +32 (0)10 81 45 30  
Fax: +32 (0) 10 84 43 04  
infobenelux@sophysa.com

### Sophysa USA

503 E Summit Street, Suite 5  
Crown Point, IN 46307 - USA  
Tel: +1 219 663 7711  
Fax: +1 219 663 7741  
contactusa@sophysa.com