


Réglage de Polaris®

KIT DE RÉGLAGE

Réf. : **PAK2**

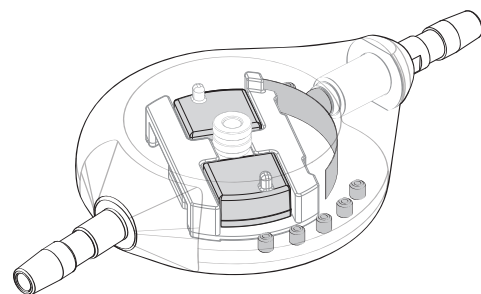

SÉLECTEUR

Le Sélecteur comporte l'empreinte de la valve et doit être positionné sur la peau dans le sens du flux. Il reçoit successivement la Boussole et l'Aimant.

BOUSSOLE

L'aiguille de la Boussole permet de détecter le centre de la Valve et la position du rotor (pour lire la pression de réglage). Son fonctionnement est optimal lorsqu'elle est utilisée horizontale.

AIMANT

L'Aimant génère le champ magnétique spécifique au déverrouillage de la Valve. Il est donc utilisé pour régler la pression et doit être parfaitement positionné au-dessus de la Valve pour la déverrouiller.

VALVE DE DÉMONSTRATION

Une Valve de démonstration sous cuir est mise à disposition pour s'entraîner au réglage de la Valve.

GUIDE RAPIDE


Un guide contenant les illustrations des étapes clef du réglage est rangé dans le couvercle du kit.

La **Valve Polaris** est munie d'un verrou magnétique performant, basé sur l'attraction magnétique mutuelle des deux micro-aimants de son rotor.

Pour réussir à régler la Valve Polaris, il faut parfaitement positionner les instruments au-dessus de la valve afin de :

- 1 • **Déverrouiller** la valve
- 2 • **Régler** la position du rotor

Pour optimiser la réussite du réglage, la valve doit être implantée sous moins de **8mm de tissu**, en appui sur une **surface osseuse** et **suturée**.

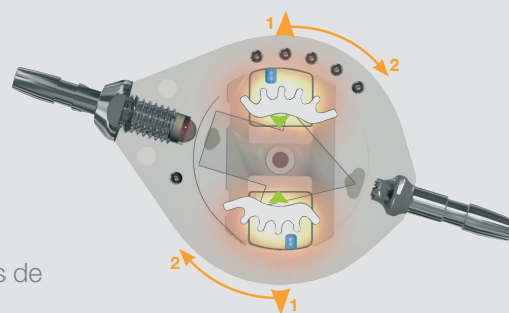


NOTE


Le kit de réglage PAK2 est réservé au réglage de la valve **Polaris**.

Pour ajuster la valve ajustable Sophy® Mini (SM8), utiliser le kit de réglage SAK (photo ci-contre).

En cas de doute sur le modèle de valve, la carte patient ou un cliché radio graphique peuvent être utilisés.

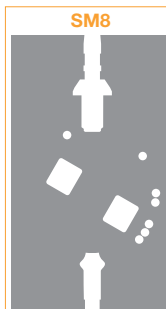

Réglage de Polaris®

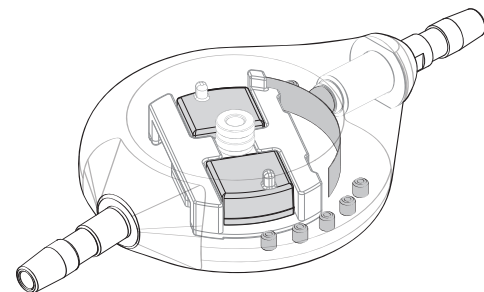

PRÉPARATION



POSITIONNEMENT PATIENT

Positionner le patient de manière à ce que la **valve** soit **horizontale**. Penser au confort du patient, et à garantir une zone dégagée autour de la valve.




PRÉPARATION SÉLECTEUR

4 modèles de Polaris sont disponibles. La **bague tournante** du sélecteur permet d'afficher la bonne gamme de pression.

LECTURE



Aligner l'empreinte du sélecteur avec l'axe des connecteurs de la valve en les palpant à travers la peau. La flèche verte matérialise le **sens du flux**.

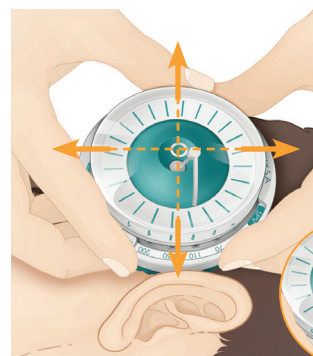

Insérer la boussole et réaliser des **mouvements plans et horizontaux** de l'ensemble Boussole-Sélecteur pour **centrer** l'aiguille dans la mire. **Aligner** l'aiguille sur la pression la plus proche.

RÉGLAGE



Insérer l'aimant avec le **repère aligné** sur la pression lue. La valve se déverrouille ainsi automatiquement.



Tourner l'aimant jusqu'à la pression désirée.



Confirmer la nouvelle pression en réinsérant la boussole. Inscrire la nouvelle pression dans la carte patient.

RÉGLAGE DIFFICILE ?



Seule la poignée de l'aimant est mobilisée. Puis elle est **recentrée** pour continuer le réglage.



Si le déverrouillage est difficile (dépôts), un mouvement de **va-et-vient** peut être imprimé à la poignée de l'aimant. Bien maintenir le sélecteur de l'autre main.



La valve est réglée sur une position extrême pour recalibrer les instruments.



Si l'orientation de la valve est difficile à déterminer et qu'aucune radio récente n'est disponible pour confirmer le réglage initial : penser à la **Méthode de la Butée** (cf. notice d'emploi)

Le kit d'ajustement Polaris® est un dispositif de Classe I destiné à lire et à modifier la pression de fonctionnement d'une valve Polaris afin de l'adapter à l'évolution clinique du patient. Marquage CE. Pour un bon usage et obtenir plus d'information, nous vous invitons à consulter les notices d'utilisation. Le dispositif présenté est fabriqué en France par Sophysa.